



Bedienungsanleitung

Achselstützen

1. Artikelbeschreibung

1.1. Einleitung

- Bei dem hier beschriebenen Artikel handelt es sich, gemäß (EU) 2017/745 MDR, um ein Medizinprodukt der Risikoklasse I.
- In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen und Hinweise zur Inbetriebnahme, Benutzung, Wartung und Pflege des Artikels. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Artikel benutzen. Beachten Sie, die Sicherheitshinweise, und handeln Sie danach.

2. Leistungsmerkmale

2.1. Zweckbestimmung

- Das Produkt dient der Entlastung bei Einschränkungen der unteren Extremitäten, bei gleichzeitigen Einschränkungen an den oberen Extremitäten. Für den sicheren Gebrauch muss eine ausreichende Arm- und Handmuskulatur gegeben sein. Es ermöglicht dem Anwender seinem Wunsch nach Mobilität nachzugehen. Menschen mit Sinnesstörungen können diesen Artikel ggf. nicht benutzen. Der Artikel stellt keine besonderen Anforderungen an die Bildung des Anwenders.

Spezifikation:

REF	Bezeichnung				
126.10...	Quick'N Easy Soft, Kinder	130kg	c	b	a
126.20...	Quick'N Easy Soft, Jugend und Damen	130kg	c	b	a
126.30.10	Quick'N Easy Soft, Standard	130kg	c	b	a
126.40.10	Quick'N Easy Soft, Überlänge	130kg	c	b	a
127.10...	Quick'N Easy Kinder	130kg	c	b	a
127.20...	Quick'N Easy Jugend und Damen	130kg	c	b	a
127.30.10	Quick'N Easy Standard	130kg	c	b	a
127.40.10	Quick'N Easy Überlänge	130kg	c	b	a
128.10	Big 200	200kg	c	b	-
129.00	Big 160	160kg	c	b	-

a=Höhenverstellbar durch Verstellungsclip/ b=Griff höhenverstellbar
 c=Einsatz im Innen- & Außenbereich

2.2. Einsatz

- Temperaturbereich: -10°C bis +35°C. Eine direkte Strahlungswärme auf den Artikel ist zu vermeiden. Luftfeuchtigkeit: 40% bis 85%. Außerhalb dieser Bedingungen ist der Artikel nur kurzzeitig einsetzbar.
- Der Artikel ist nicht im Schwimmbad oder einer Sauna verwendbar, da Oberflächenverfärbungen und Einschränkungen der mechanischen Festigkeit entstehen können.

2.3. Lagerung & Transport

- Temperaturbereich: +5° C bis +25° C. Eine direkte Strahlungswärme auf den Artikel ist zu vermeiden. Den Artikel in trockenen Räumen bei einer Luftfeuchtigkeit bis 65% lagern.

2.4. Entsorgung

- Die Entsorgung und Recycling benutzter Produkte und Verpackungen müssen gemäß den geltenden Vorschriften erfolgen. Erkundigen Sie sich bei einem Entsorgungsunternehmen. Das Infektionsschutzgesetz ist zu beachten. Beachten Sie die Kennzeichnungen auf den Verpackungsmaterialien und handeln Sie danach.

3. Symbole & Typenschilder

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Anleitung lesen!		Baujahr Produkt
	Artikelnummer		Hersteller
	Sprache		Maximales Nutzergewicht in kg
	Wichtige Information!		Produkt entspricht (EU) 2017/745 MDR

4. Garantie

- Der Artikel hat eine Herstellergarantie von 12 Monaten. Voraussetzung sind die allgemeinen AGBs (www.rebotec.de/agbs), sowie die bestimmungsgemäße Verwendung. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.
- Eigenmächtig durchgeführte Änderungen an diesem Artikel, führen zum Erlöschen der Produktkonformität und zum Verlust der Garantie.

4.1. Reklamation

- Bitte nehmen Sie vor einer Rücksendung Kontakt zu uns auf. Um Transportschäden zu mindern, verwenden Sie möglichst die Originalverpackung.
- Das Infektionsschutzgesetz ist einzuhalten.
 - Stellen Sie sicher, dass von dem Artikel bei Rücksendung keine Infektionsgefahr ausgeht. Kennzeichnen Sie den Artikel mit einem Infoblatt zur Unbedenklichkeit. Für Rücksendungen, die nicht als unbedenklich gekennzeichnet sind, fallen ggf. Kosten an.

5. Sicherheitshinweise



Folgende Sicherheitshinweise beachten:

- Vor der Erstinbetriebnahme ist die Bedienungsanleitung vollständig zu lesen, um Schäden durch Fehlbedienung oder Gefährdungen zu vermeiden. Vor jeder Inbetriebnahme überprüfen Sie, ob am Artikel erkennbare Schäden vorhanden sind. Bei Funktionsstörungen oder Beschädigungen jeglicher Art darf der Artikel nicht verwendet werden. Überprüfen Sie regelmäßig die Saugkapsel auf Beschädigungen und Abnutzung; gegebenenfalls erneuern.
- Die Gehhilfe muss beim Gehen so senkrecht wie möglich aufgesetzt werden. Setzen Sie daher die Gehhilfe nie zu weit vom Körper entfernt auf oder nach vorne in Gehrichtung. Umfassen Sie den Handgriff mit einer Hand vollständig und fest. Lassen Sie sich nach Möglichkeit von einer Hilfsperson begleiten und stützen, damit Sie diese bei einem eventuellen Fallen auffangen kann.
- Die Gehhilfe darf keinesfalls zweckentfremdet werden. Deshalb benutzen Sie diese nur zur Unterstützung der Gehfähigkeit und nicht z.B. als Aufstehhilfe, zum Hebeln, versetzen von Möbeln und anderen Gegenständen. An der Gehhilfe keine Gegenstände (Tasche, Beutel, usw.) anhängen.
- Nach längerer Nichtbenutzung: Gehhilfe durch Fachpersonal bzw. Fachhandel überprüfen lassen. Es dürfen keine eigenständigen mechanischen Veränderungen vorgenommen werden (Produkthaftung!). Die Gehhilfe nicht über längeren Zeitraum der Sonneneinstrahlung aussetzen (am Fenster, an der Heizung, im PKW). Hitze kann zu Veränderung der Materialeigenschaften und Haltbarkeit führen.
- **Achtung, Rutschgefahr:** Gehen Sie niemals mit der Gehhilfe ohne Gleitschützer (Eiskralle) auf schnee- oder eisbedeckten Untergrund. Vorsicht bei feuchten Fliesen, Böden oder überqueren von losen Teppichböden. Griffe oder Saugkapseln niemals mit ölhaltigen Substanzen reinigen. Vorsicht bei Unebenheiten, Löchern im Boden und losem Untergrund, weil die Gehhilfe dabei unerwartet wegrutschen oder einsinken kann.



- Bei Oberflächentemperaturen > 40°C besteht Verletzungsgefahr. Setzen Sie den Artikel keiner zu hoher Temperatur aus (Sonneneinstrahlung, Heizung, heißem Wasser). Artikel vor Gebrauch abkühlen lassen.



Bei Benutzung des Artikels, durch Anwender mit unempfindlicher Haut (keine Temperaturwahrnehmung oder Hautschäden) ist durch das Pflegepersonal eine Wärmekontrolle (z.B. Berührung mit Handrücken) durchzuführen.

6. Meldung von Vorfällen

- Schwerwiegende Vorfälle in Zusammenhang mit dem Artikel, sind unverzüglich dem Hersteller (pms@rebotec.de) und dem BfArM (www.bfarm.de/DE) zu melden. Nutzen Sie die BfArM-Meldefunktionen und Formulare.

7. Wiedereinsatz, Lebensdauer


- Der Artikel ist für den Wiedereinsatz geeignet. Die Anzahl der Wiedereinsätze ist abhängig von der Nutzungsintensität und Nutzungsweise des Artikels. Vor dem Wiedereinsatz ist der Artikel aufzubereiten und die technisch, funktionelle Sicherheit des Artikels zu prüfen und ggf. wiederherzustellen. Weitere Informationen sind der Aufbereitungsanleitung (01.12.154), zu entnehmen. Die Aufbereitungsanleitung und diese Bedienungsanleitung können unter www.rebotec.de/downloads heruntergeladen werden.
- Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch beträgt die Produktlebensdauer 2 Jahre. Die effektive Lebensdauer kann, abhängig von der Intensität des Gebrauchs und des Allgemeinzustandes, variieren.

8. Gebrauchszustand herstellen

- Der Artikel wurde im Werk auf Fehlerfreiheit und Vollständigkeit geprüft. Bitte prüfen Sie den Artikel nach Erhalt auf eventuelle Transportschäden und auf Vollständigkeit des Lieferumfangs.

8.1. Höhenverstellung der Achselstützen

- Achselhöhe einstellen:** Zur Einstellung der individuellen Griff- und Achselhöhe (C) entfernen Sie die beiden roten Clips (A–B) durch beidseitiges Drücken gegen die Laschen der Clips (D).
- Achselpolster einstellen:** Stellen Sie zuerst die benötigte Höhe des Achselpolsters ein (F–F). Achten Sie hierbei auf eine Überdeckung der Bohrungen in den Aluminiumrohren.
- Handaufnahme einstellen:** Danach stellen Sie die individuelle Höhe der Handaufnahme (C–C) ein. Achten Sie hierbei auf eine Überdeckung der Bohrungen im Bereich (A–B). Achten Sie auch darauf, dass die Führung des Griffes, oberhalb und unterhalb jeweils eine Bohrung überdeckt (E).
- Hinweis:** Bei großen Einstellungen der Höhe des Achselpolsters muss sich, der in den Bohrungen sichtbare, rote Rohrinneinstopfen (G), mindestens eine Bohrung tiefer befinden als die Clips (A–B). Jetzt drücken Sie die roten Clips (H) in Ihre Endposition.

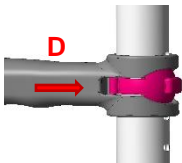


- Endprüfung:** Prüfen Sie zum Schluss den festen Sitz des Achselpolsters in Richtung (F–F) und den festen Sitz des Handgriffes in Richtung (C–C).



8.2. Höhenverstellung der BIG-Achselstütze


- Achselhöhe einstellen:** Mit einem Maulschlüssel SW 13 einseitig die Hutmutter (A) lösen und die Gewindebolzen herausziehen. Das Unterrohr entsprechend der gewünschten Achselhöhe verschieben. Dabei auf die Bohrraster achten. Die Gewindebolzen durchstecken und wieder die Hutmutter (A) fest anziehen.
- Griffhöhe einstellen:** Mit einem Maulschlüssel SW 13 einseitig die Hutmutter (B) lösen und den Gewindebolzen herausziehen. Den anatomischen Griff (rechte und linke Ausführung beachten) in den gewünschten Abstand bringen (Bohrraster beachten). Den Gewindebolzen durchstecken und wieder die Hutmutter (B) fest anziehen.

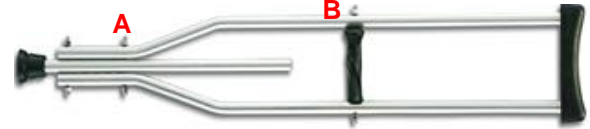

9. Produktdaten

- Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber der in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Ausführung behalten wir uns vor.

REF	a1/c mm	a2/c mm	b1/c mm	b2/ mm	c/ mm
126.10...	480	710	830	1030	22
126.20...	580	810	1000	1200	22
126.30.10	680	910	1180	1380	22
126.40.10	760	980	1360	1560	22
127.10...	480	710	830	1030	22
127.20...	580	810	1000	1200	22
127.30.10	680	910	1180	1380	22
127.40.10	760	980	1360	1560	22
128.10	650	830	1180	1500	22-24
129.00	650	830	1180	1500	22-24

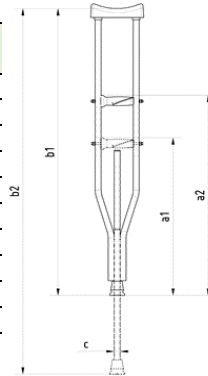

a=Griffhöhe, b=Achselhöhe c=Saugkapsel Größe

10. Pflege

- Zur Pflege verwenden Sie ein mildes handelsübliches Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Nach dem Reinigen wischen Sie mit klarem Wasser nach und reiben die Gehhilfe mit einem Tuch trocken ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Reinigungsmittel mit aggressiven Lösungszusätzen (Produktthinweise beachten!), sowie harte Reinigungsgegenstände, da sonst die Oberflächen beschädigt werden oder sich Ablagerungen bilden können.

11. Wartung

- Lassen Sie Ihre Gehhilfe mindestens 1x halbjährlich von Ihrem Fachhändler prüfen. Verschlossene Saugkapseln (Verschleißteil) sind umgehend auszutauschen. Auf Durchmesser achten (siehe 9) Ziehen Sie die Saugkapsel vom Ende des Rohres ab. Neue Saugkapsel bis zum Anschlag aufdrücken und den festen Sitz überprüfen.

Ersatzteile & Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung
200...20	Saugkapsel 22mm
201.30.26	Verstellungsclip 22mm
202.85.00	Führungsbuchse 22mm
01.02.005	Bedienungsanleitung
01.12.154	Aufbereitungsanleitung
160.00.101	Griffpolster Mini
160.00.102	Griffpolster Standard
160.00.103	Griffpolster Big
168.10.22	Big Foot (Antirutschpuffer)