

Unsere Individualisten – die AirFit™ F30i Full Face Maske

Eine Full Face Maske mit nach oben geführtem Schlauch, mit der sich Patient:innen im Bett freier bewegen, in jeder Position schlafen¹ und ganz bequem lesen und entspannen können. Das ultrakompakte, vorgeformte Maskenkissen schmiegt sich bequem unter der Nase an und sorgt für eine zuverlässige Abdichtung.¹

Die AirFit F30i vereint funktionales, minimalistisches Design mit echter Bewegungsfreiheit.

Flexibler Anschluss, freie Bewegung

Das Kniestück mit der praktischen Schnelllösefunktion ermöglicht ein einfaches Anschließen und Abtrennen während der Nacht. Die 360°-Drehbarkeit sorgt für mehr Bewegungsfreiheit.¹

Minimalistisches Maskenkissendesign

Das ultrakompakte Maskenkissen schmiegt sich unter die Nase und ist so konzipiert, dass es eine Rundumstabilität, eine verbesserte Sichtfreiheit und einen begrenzten Gesichtskontakt bietet. Vier Kissengrößen, passend für unterschiedlichste Gesichter.

Maskenrahmen aus Silikon

Der passgenaue Rahmen wurde so konzipiert, dass er für mehr Leichtigkeit bei gleichzeitig stabilem Halt sorgt.

Weiches Kopfband


Die Ränder des Kopfbandes sind besonders weich und unterstützen einen bequemen Start in die Therapie.

Praktischer Rahmenanschluss

Einfach an- und abzuklipsen.

Schnelle und präzise Anpassung¹

Die Maske lässt sich mit Magnetclips*, die das Kopfband schnell und zielgenau zum Rahmen führen, bequem und intuitiv aufsetzen und abnehmen.

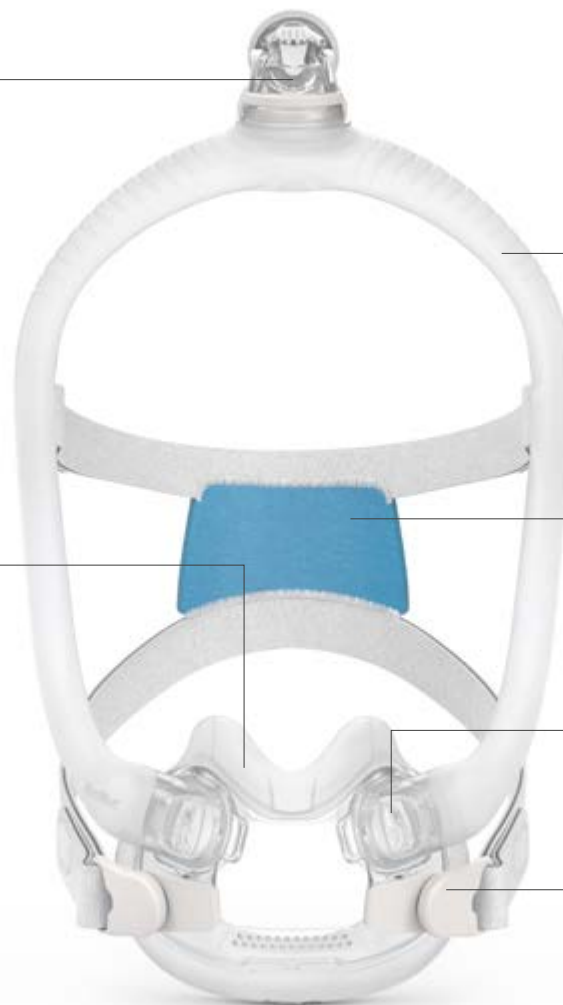

AirFit F30i Non Magnetic

Alternativ steht eine Non Magnetic Version zur Verfügung.

Ein sanfter, behutsamer Ansatz

Die AirFit F30i wurde entwickelt, um typische Therapiebarrieren bei Full Face Masken zu überwinden: Platzangst, Unbequemlichkeit, Unbehagen und das eigene Aussehen mit der Maske.²



Technische Daten

Produktklasse nach Verordnung MDR (EU) 2017/745	II a	Abmessungen (H x B x T)	siehe Gebrauchsanweisung
Therapiedruck	4 bis 30 cm H ₂ O (hPa)	Gewicht	Maskenkomponenten
Totraumvolumen (Leervolumen der Maske bis zum Drehadapter)	Kissen: S: 122 ml, M: 127 ml, SW: 129 ml, W: 150 ml, Kniestück: 17 ml, Rahmen: S: 97 ml, M: 101 ml, L: 105 ml		Kissen: S: 23 g, M: 25 g, SW: 26 g, W: 29 g, Rahmen: S: 58 g, STD: 59 g, L: 60 g, Kopfband: 22 g, Kniestück: 11 g
Widerstand bei gegenüber der Umgebung geschlossenem Anti-Asphyxie-Ventil (AAV) Gemessener Druckabfall (Sollwert)	bei 50 l/min: 0,2 cm H ₂ O bei 100 l/min: 1,0 cm H ₂ O	Umgebungsbedingungen	
Geräusche Angegebene Zweizahl-Geräuschemissionswerte nach ISO 4871:		Temperatur im Betrieb	+5 °C bis +40 °C
• Schallleistungspegel:	25 dB(A)	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 % bis 95 % (ohne Kondensation)
• Schalldruckpegel:	18 dB(A)	Aufbewahrungs- und Transporttemperaturen	-20 °C bis +60 °C
• Unsicherheitsfaktor:	3 dB(A)	Aufbewahrungs- und Transportluftfeuchtigkeit	bis zu 95 % relative Feuchtigkeit ohne Kondensation
		Schlauchanschluss	
		Konus nach EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (männl.)
		Maskeneinstelloptionen am ResMed-Gerät:**	Full Face
		Hinweis	Das Maskensystem enthält kein Latex aus Naturkautschuk.

Artikelnummern

Bezeichnung	Artikel-Nr. Standard Version*	HMV-Pos.-Nr. Standard Version	Artikel-Nr. Non Magnetic Version	HMV-Pos.-Nr. Non Magnetic Version
AirFit F30i Maskenset - Kissen S/Rahmen S	63310		63341	
AirFit F30i Maskenset - Kissen S/Rahmen STD	63311		63342	
AirFit F30i Maskenset - Kissen M/Rahmen STD	63312	14.24.16.6061	63343	14.24.16.6071
AirFit F30i Maskenset - Kissen W/Rahmen STD	63313		63344	
AirFit F30i Maskenset - Kissen M/Rahmen Large	63314		63345	

Informationen zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen, die vor und während der Verwendung des Produkts zu beachten sind, finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Dieser Inhalt ist nur für Angehörige der Gesundheitsberufe bestimmt.

* Die Maske enthält Magnete, die bestimmte Implantate oder medizinische Geräte negativ beeinflussen könnten. Sie dürfen von Patient:innen mit aktiven medizinischen Implantaten, die mit Magneten interagieren, und/oder metallischen Implantaten/Gegenständen, die ferromagnetisches Material enthalten, nicht verwendet werden. Dies gilt auch für andere Personen, die in engen körperlichen Kontakt mit einem/einer Maskenträger:in kommen. Halten Sie die Magnete der Maske in einem Sicherheitsabstand von mindestens 15 cm zu Implantaten oder medizinischen Geräten, die durch magnetische Interferenzen negativ beeinflusst werden könnten. Ausführliche Informationen, einschließlich Kontraindikationen und Warnhinweise für Magnete, sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

** Details zu den Geräteeinstellungen finden Sie in der Masken-Geräte-Kompatibilitätsliste, die Ihnen im Support-Center (siehe QR-Code) zur Verfügung steht.

1 Externe unveröffentlichte klinische Studie von ResMed mit 51 teilnehmenden Personen, die zu dieser Zeit eine Full Face Maske verwendeten, durchgeführt vom 24.10.2018 bis 20.11.2018, 2018; ID A4484728.

2 Wimms A. et al., Impact of a New Nasal Pillows Mask on Patients' Acceptance, Compliance, and Willingness to Remain on CPAP Therapy. Sleep Disord, 2016. 2016; p. 6713236.



Mehr Informationen finden Sie in unserem Maskenkatalog unter [Lead.me/maskenkatalog](https://lead.me/maskenkatalog) oder scannen Sie den QR-Code.



Gebrauchsanweisungen, Desinfektionsanleitungen und weitere Produktinformationen finden Sie im Support-Center unter [Lead.me/support-center](https://lead.me/support-center) oder scannen Sie den QR-Code.