

**Anwendung**

Hängen Sie den Urinflaschen-Halter mit dem gebogenen Ende über den Bettrahmen. Je besser der Urinflaschen-Halter vom Bett aus erreichbar ist, desto geringer ist das Risiko eines Sturzes aus dem Bett, wenn der Anwender sich die Urinflasche noch selbst anlegen kann.

**Reinigung/Desinfektion**

Reinigen Sie die Halterung regelmäßig gründlich und mit einem Haushaltsreiniger oder einem handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

**Material**

Gestell aus Stahldraht, Ø 3,8 mm mit Kunststoff-Beschichtung.

**Entsorgung**

Über den Hausmüll.

**Maße**

13,5 x 12,5 x 32,2 cm (L x B x H).

Die Aufhängung des Urinflaschen-Halters eignet sich für Bettgestelle mit einer Stärke von bis zu 5,5 cm.

**Urinflaschen-Set**

Art.-Nr. 18100 000

PZN 03628093

PHV-Nr. 51.40.01.1004

bestehend aus:

**Urinflasche für Männer**

**Urinflaschen-Halter mit Deckel**

**Urinflaschenbürste**

**Detailinformationen finden Sie unter den jeweiligen Einzelprodukten.**

Fragen Sie Ihren Fachhändler auch nach dem RUSSKA **Ratgeber »Pflege zu Hause«**.

Dort lesen Sie Produktinformationen und Anwendungshinweise über weitere Pflegehilfsmittel.

Sie finden außerdem praktische und nützliche Tipps für die Pflege im häuslichen Bereich und zum Thema Pflegeversicherung.

**MD** Dieses Produkt entspricht der Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte und trägt eine CE-Kennzeichnung. **CE**

Sollte es im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt zu einem schwerwiegenden Vorfall kommen, kontaktieren Sie den Hersteller dieses Produktes sowie die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Deutschland: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM, [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de).

Österreich: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen BASG, [www.basg.gv.at](http://www.basg.gv.at).

Schweiz: Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic, [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch).

## Gebrauchsanleitung



Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf!

# Urinflasche

### Urinflasche für Männer, milchig

Art.-Nr. 18120 000

PZN 02743610

PHV-Nr. 51.40.01.1003

Urinflasche aus Kunststoff, mit Skala und hygienisch abschließendem Deckel. Fassungsvermögen: 1 Liter.

### Urinflasche für Männer, glasklar

Art.-Nr. 18130 000

PZN 02743627

PHV-Nr. 51.40.01.1002

Urinflasche aus Kunststoff, mit Skala und hygienisch abschließendem Deckel. Fassungsvermögen: 1 Liter.

### Urinflasche für Frauen

Art.-Nr. 18140 000

PZN 03055007

PHV-Nr. 51.40.01.1001

Urinflasche aus Kunststoff, mit speziell für Frauen geformtem Einlass, milchig, mit Skala und hygienisch abschließendem Deckel. Fassungsvermögen: 1 Liter.

### Indikationen

Urinflaschen ermöglichen Personen das Wasserlassen im Bett, wenn die Benutzung der Toilette oder eines Toilettenrollstuhls/eines Toilettenstuhls nicht möglich ist.

### Kontraindikationen

Es bestehen keine Kontraindikationen.

### Anwendung

Urinflaschen helfen bei der Pflege bettlägeriger Patienten, die nicht selbstständig die Toilette aufsuchen können. Mit ihnen lässt sich der Urin sicher auffangen und danach entsorgen. Der integrierte Verschluss sorgt für eine hygienische Handhabung.

### Sicherheitshinweise

- Vor dem ersten Benutzen ist es wichtig, die Urinflasche zu reinigen, um einen hygienisch einwandfreien Kontakt zu gewährleisten.
- Prüfen Sie außerdem, ob an der Flasche scharfe Kanten vorhanden sind, die produktionsbedingt entstehen können. Entfernen Sie diese gegebenenfalls, um Verletzungen zu vermeiden.
- Der Deckel schließt die Urinflasche hygienisch ab, bietet jedoch keinen zuverlässigen Auslaufschutz!

## Lieferumfang

Flasche mit Deckel.

## Anwendung

Bei der Anwendung führen Sie die Urinflasche vorsichtig an den Intimbereich und positionieren sie so, dass der Urin ungehindert in die Flasche gelangen kann ohne zurückzulaufen. Verhindern Sie nach dem Ausscheiden ein Auslaufen der Flasche, indem Sie die Flasche vorsichtig vom Intimbereich entfernen, sie mit dem Deckel verschließen und sie mit der Öffnung nach oben möglichst in eine dafür vorgesehene Halterung – wie unter »Zubehör« beschrieben – stellen. Danach leeren und reinigen Sie die Urinflasche möglichst bald, um die Intimsphäre des Patienten sowie die Hygiene zu wahren. Bewahren Sie die Urinflasche nur gereinigt auf und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. ☼

## Reinigung/Desinfektion

Aus hygienischen Gründen empfehlen wir den Gebrauch von Schutzhandschuhen. Bei der Verwendung von Kunststoff-Handschuhen achten Sie darauf, dass Ihnen die Urinflasche nicht aus der Hand rutscht! Die Urinflasche ist nur für den Kontakt mit intakter Haut bestimmt. Für die manuelle Reinigung ist ein handelsüblicher, materialschonender Reiniger zu verwenden. Die Desinfektion ist mit einem DGHM-/VAH-gelisteten, materialverträglichen Flächendesinfektionsmittel durchzuführen. Die Auswahl und Anwendung geeigneter Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist entsprechend den jeweiligen Herstellerangaben vorzunehmen.

Zur Entfernung von Urinstein oder Kalkablagerungen keine essigsäurehaltigen Kalklöser einsetzen. Wir empfehlen hier die Verwendung von Ultrana BioKalklöser auf Basis von Zitronen- und Milchsäure, der materialverträglich ist. Die Desinfektion kann mit Ultrana CWC 2000 durchgeführt werden. Ultrana CWC 2000 wirkt nicht nur desinfizierend, es wirkt außerdem geruchsneutralisierend. Innenflächen der Urinflasche mit CWC 2000 einsprühen oder ausschwenken. Nach 5 Minuten Einwirkzeit mit klarem Wasser ausspülen.

Art.-Nr. 18120 000 autoklavierbar bis 130 °C.

Art.-Nr. 18130 000 hitzebeständig bis 60 °C.

Art.-Nr. 18140 000 hitzebeständig bis 90 °C.

Hinweis: Die jeweiligen Deckel aus Polyethylen sind hitzebeständig bis 60 °C. Daher empfehlen wir die Deckel beim Desinfizieren der Urinflaschen für Männer vorher zu entfernen.

## Material

Art.-Nr. 18120 000 Urinflasche: Polypropylen. Deckel: Polyethylen.

Art.-Nr. 18130 000 Urinflasche: Polyvinylchlorid. Deckel: Polyethylen.

Art.-Nr. 18140 000 Urinflasche: Polypropylen. Deckel: Polyethylen.

## Entsorgung

Die Urinflasche kann gesäubert über den Hausmüll entsorgt werden. Den Urin entsorgen Sie in der Toilette.

## Zubehör

Zu den Urinflaschen gibt es praktisches Zubehör, das einen hygienisch einwandfreien Gebrauch gewährleistet:

- Urinflaschenbürste, zur optimalen Reinigung aller Urinflaschen.
- Urinflaschen-Halter, geeignet zur Befestigung am Pflegebett.

# Urinflaschenbürste

**Art.-Nr. 18134 000**

**PZN 03054982**

Die Urinflaschenbürste dient zum Reinigen von Urinflaschen und -schiffchen.

## Material

Borsten in Draht gedreht. Borsten und Griff aus Polypropylen.

## Entsorgung

Über den Hausmüll.

## Maße

Ca. 43 cm lang.

# Urinflaschen-Halter

**Art.-Nr. 18135 001 mit Deckel**

**PZN 06311008**

**PHV-Nr. 51.40.01.3002**

**Art.-Nr. 18135 002 ohne Deckel**

**PZN 0995690**

**PHV-Nr. 51.40.01.3002**

## Indikationen

Urinflaschen-Halter sind Zubehör zu Urinflaschen.

## Kontraindikationen

Es bestehen keine Kontraindikationen.

## Anwendung

Der Urinflaschen-Halter bietet Ihnen die Möglichkeit, die Urinflaschen immer griffbereit direkt am Pflegebett bereitzustellen. Geeignet für die Modelle Art.-Nr. 18120 000 (milchig) und Art.-Nr. 18130 000 (glasklar).

### **Sicherheitshinweise**

- Achten Sie darauf, dass die Kunststoff-Beschichtung des Halters intakt ist, um ein eventuelles Zerkratzen des Bettrahmens zu vermeiden.
- Bei einem Bruch des Drahtgestells besteht Verletzungsgefahr!
- Stellen Sie die Urinflasche immer mit der Öffnung nach oben in den Urinflaschen-Halter.
- Der Deckel am Urinflaschen-Halter mit Deckel Art.-Nr. 18135 001 schließt die Urinflasche hygienisch ab, bietet jedoch keinen Auslaufschutz.