



Duschstuhl *Atlantic*



DE



Lesen Sie aufmerksam die komplette Gebrauchsanleitung, bevor Sie den Duschstuhl *Atlantic* montieren oder erstmalig in Gebrauch nehmen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf, so dass sie für die spätere Verwendung zur Verfügung steht.

Zweckbestimmung


Zur Unterstützung beim Duschen für Personen, die in Ihrer Mobilität eingeschränkt sind und nicht länger stehen können. Die ergonomisch geformte Anti-Rutsch-Sitzfläche mit Abflussvorrichtung und integrierten Haltegriffen ermöglicht einen sicheren Halt während der Nutzung. Die Gummifüße verhindern ein Wegrutschen und garantieren einen stabilen Stand. Durch die höhenverstellbaren Beine ist der Duschstuhl *Atlantic* für den Gebrauch von Personen mit unterschiedlicher Körperlänge verwendbar.

Indikation



Der Duschstuhl *Atlantic* kann genutzt werden bei Verlust der unteren Gliedmaßen, bei leichten Gleichgewichts- und Sehstörungen, leichter Einschränkung der Beweglichkeit der Beine und Kniegelenke und bei Kraftverlust, der das längere Stehen unmöglich macht.

Montage/Anleitung


1. Entnehmen Sie die Einzelteile aus dem Karton und überprüfen sie diese auf Vollständigkeit und Beschädigungen.

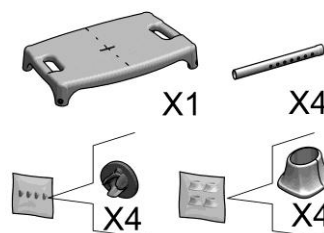


2. Legen Sie die Sitzfläche verkehrt herum auf einen Tisch oder den Boden und drücken Sie die vier Beine des Stuhls mit dem Loch am oberen Ende nach außen. Die Löcher für die Höheneinstellung zeigen nach innen.

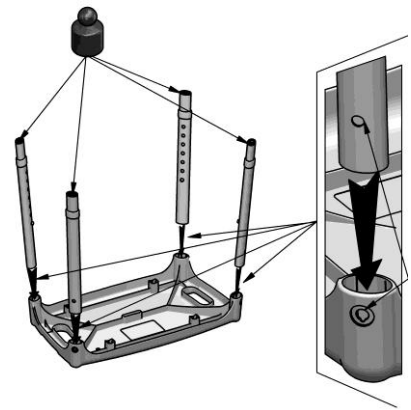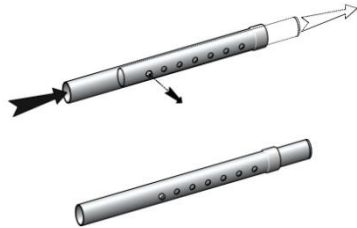

3. Drücken Sie die orangenen Verschlusskappen in die Öffnungen an der Sitzfläche – achten Sie hierbei auf die Aussparung – die Beine sind jetzt zusätzlich fixiert.

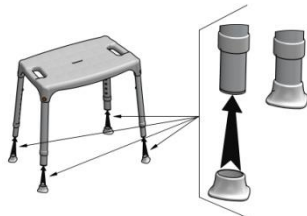

4. Stecken Sie die Gummifüße auf die Enden der Stuhlbeine.

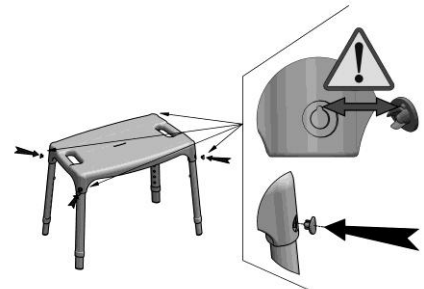

Sicherheitshinweise



1. Überprüfen Sie vor **jeder** Benutzung den festen Stand der Beine!
2. Achten Sie darauf, dass die Höhe der Beine gleich ist und dass die Druckknöpfe fest in den Öffnungen sitzen!
3. Lehnen Sie sich nicht nach hinten, der Duschstuhl *Atlantic* hat keine Rückenlehne- es besteht Verletzungsgefahr!
4. Setzen Sie sich immer auf die gesamte Sitzfläche!
5. Verstellen Sie die Höhe der Beine nur, wenn der Duschstuhl *Atlantic* nicht benutzt wird!
6. Stellen Sie sich nicht auf den Duschstuhl *Atlantic*!
7. Die maximale Belastbarkeit beträgt 150 kg!

Reinigung

Sie sollten den Duschstuhl *Atlantic*, der zur Wiederverwendung bestimmt ist, nach jeder Benutzung reinigen und regelmäßig desinfizieren. Das ist bei der Nutzung und beim Wiedereinsatz durch einen anderen Patienten/durch eine andere Person zwingend erforderlich! Spülen Sie den Duschstuhl *Atlantic* mit warmem Wasser ab und verwenden Sie für die Reinigung eine milde Seifenlauge. Trocknen Sie den Duschstuhl *Atlantic* mit einem weichen Tuch und achten Sie im Badezimmer auf eine gute Belüftung. Die Desinfektion kann mit einem handelsüblichen Mittel gemäß Herstellerangaben durchgeführt werden, z. B. Descosept AF. Der Duschstuhl *Atlantic* besteht aus den Materialien, die gegen Korrosion geschützt und unempfindlich gegen handelsübliche

Desinfektions- und Reinigungsmittel sind. Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel sowie Hochdruck- oder Dampfreiniger!

Kontraindikation

Die Verwendung des Duschstuhls *Atlantic* ist nicht angezeigt bei Gleichgewichts- und Wahrnehmungsstörungen sowie bei Verlust der Gliedmaßen an den Armen als auch bei Lähmungen oder starken Rumpfschmerzen.

Lagerung

Während der Nutzung im Bad muss für eine gute Lüftung gesorgt werden, um der Schimmelbildung auf dem Duschstuhl *Atlantic* vorzubeugen. Zur Lagerung des Duschstuhls *Atlantic*, wenn dieser nicht genutzt wird, muss dieser komplett trocken sein. Danach bewahren Sie diesen in dem mitgelieferten Polybeutel und Karton an einem trockenen und lichtgeschützten Ort auf.

Wartung


Der Duschstuhl *Atlantic* ist wartungsfrei. Sollten Sie Schäden oder Veränderungen am Material feststellen oder einen instabilen Stand, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Benutzen Sie keinen defekten Duschstuhl *Atlantic*!

Technische Daten/Maße und Gewicht

Höhe (einstellbar über die Beine):	39-54 cm
Breite der Sitzfläche:	50 cm
Tiefe der Sitzfläche:	30 cm
Gewicht:	2 kg
max. Belastbarkeit:	150 kg
Material:	eloxiertes Aluminium, Polypropylen, Gummi

Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Produktmängel, die nachweislich auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.

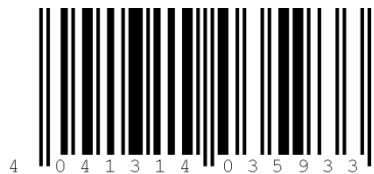

Daimlerstrasse 12 a
D-25337 Elmshorn
Tel.: (0)4121 4733 12
Fax: (0)4121 4733 23
www.rehaforum.com
info@rehaforum.com

Art. 13168178