

Gebrauchsanleitung

Urinflasche für Männer, auslaufsicher

Art.-Nr. 18150 000

PZN 01334565



Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf!

Auslaufsichere Urinflasche aus Kunststoff, milchig, mit Skala und verkürztem Hals. Mit abnehmbarem, phosphoreszierendem Griff, leuchtet sanft im Dunkeln. Fassungsvermögen: 1 Liter.

Urinflaschen helfen bei der Pflege bettlägeriger Patienten, die nicht selbstständig die Toilette aufsuchen können. Mit ihnen lässt sich der Urin sicher auffangen und danach entsorgen. Der integrierte Verschluss sorgt für eine hygienische Handhabung.

Sicherheitshinweise

- Vor dem ersten Benutzen ist es wichtig, die Urinflasche zu reinigen, um einen hygienisch einwandfreien Kontakt zu gewährleisten.
- Das Fassungsvermögen beträgt maximal 1 Liter. Wird die Flasche mit mehr als 1 Liter befüllt, kann der Auslaufschutz nicht garantiert werden! Die Auslaufsicherheit ist nur mit dem grünen Auslaufschutz gewährleistet!

Lieferumfang

- 1 Urinflasche
- 1 Griff
- 1 Sicherheits-Schraubverschluss rot
- 1 Auslaufschutz-Trichter grün
- 1 Standard-Schraubverschluss weiß
- 1 Reinigungsbürste

Anwendung

In den verkürzten Hals dieser auslaufsicheren Urinflasche wird der trichterförmige Auslaufschutz mit abgerundetem Rand und Schraubgewinde eingesetzt. Dadurch wird das Auslaufen des Urins verhindert. Ein Vorteil, der dem Betroffenen Sicherheit beim Gebrauch der Urinflasche gibt und zugleich seine Selbstständigkeit fördert.

Vor Gebrauch sollten Sie den beiliegenden Griff aufschieben. Durch den Griff lässt sich die Urinflasche leichter anlegen, entnehmen, entleeren und reinigen. Bei der Anwendung führen Sie die Urinflasche vorsichtig an den Intimbereich und positionieren sie so, dass der Urin ungehindert in die Flasche gelangen kann, ohne zurückzulaufen. Verhindern Sie nach dem Ausscheiden ein Auslaufen der Flasche, indem Sie die Flasche vorsichtig vom Intimbereich entfernen. Schrauben Sie den grünen Auslaufschutz auf die Öffnung, wenn Sie die Flasche nicht sofort entleeren können. Zur Leerung bitte den weißen Schraubverschluss abschrauben. Den beiliegenden roten Sicherheits-Schraubverschluss können Sie gegen den weißen Verschluss ohne Sicherung austauschen. Leeren und reinigen Sie die Urinflasche möglichst bald, um die Intimsphäre des Patienten sowie die Hygiene zu wahren. Außerdem vermeiden Sie so eine eventuelle Verbreitung von Keimen.

Bewahren Sie die Urinflasche nur gereinigt auf und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. ☀

Reinigung/Desinfektion

Aus hygienischen Gründen empfehlen wir den Gebrauch von Schutzhandschuhen. Bei der Verwendung von Kunststoff-Handschuhen achten Sie darauf, dass Ihnen die Urinflasche nicht aus der Hand rutscht! Der grüne Auslaufschutz kann mit Hilfe der beiliegenden Bürste gereinigt werden. Die Urinflasche ist nur für den Kontakt mit intakter Haut bestimmt. Für die manuelle Reinigung ist ein materialschonender Reiniger zu verwenden. Die Desinfektion ist mit einem DGHM-/VAH-gelisteten, materialverträglichen Flächendesinfektionsmittel durchzuführen. Die Auswahl und Anwendung geeigneter Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist entsprechend den jeweiligen Herstellerangaben vorzunehmen. Ein Sterilisieren der Urinflasche ist im Autoklav bis 130 °C möglich. Der rote Verschlussdeckel ist nicht autoklavierbar.

Material

Polypropylen.

Entsorgung

Alle Komponenten können gereinigt über den Hausmüll entsorgt werden. Den Urin entsorgen Sie in der Toilette.

Fragen Sie Ihren Fachhändler auch nach dem RUSSKA **Ratgeber »Pflege zu Hause«**.

Dort lesen Sie Produktinformationen und Anwendungshinweise über weitere Pflegehilfsmittel. Sie finden außerdem praktische und nützliche Tipps für die Pflege im häuslichen Bereich und zum Thema Pflegeversicherung.



Hersteller: GOUGET 3, Rue d'Auteuil
75016 Paris, Frankreich



Vertrieb: Ludwig Bertram GmbH
Im Torfstich 7, 30916 Isernhagen, www.russka.de