

Technische Daten

Produkt	Rohre	Oberteil
Gehstock	eloxierte Alu-Legierung (pulverbeschichtet)	Polpropylen (PP)
Gehstock/ablängbar	Alu-Legierung/Stahlrohr	Polpropylen (PP), Polyurethan (PUR)

Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Griffhöhe von-bis cm	Kapselgröße mm	max. Körpergewicht
121.10.10	HEMI – Stock	Mini - links	124 – 144	19	100kg
121.10.20	HEMI – Stock	Mini - rechts	124 – 144	19	100kg
121.20.10	HEMI – Stock	Maxi - links	146 – 188	19	100kg
121.20.20	HEMI – Stock	Maxi - rechts	146 – 188	19	100kg
133. ...	Gehstock verstellbar	Simplex mit Fritzgriff	73 – 95,5	17	100kg
134.10	Gehstock ablängbar	PARA-Soft -links/rechts	max. 117,5	17	150kg
135.16	Gehstock ablängbar	PARA-Soft- links/rechts	max. 107,5	17	100kg
136. ...	Gehstock verstellbar	Handy – links	72,5 – 95	17	100kg
138. ...	Gehstock verstellbar	Handy – rechts	72,5 – 95	17	100kg
142. ...	Gehstock verstellbar	Anatom – links	73 – 95,5	17	100kg
144. ...	Gehstock verstellbar	Anatom – rechts	73 – 95,5	17	100kg
146. ...	Gehstock verstellbar	Fischergriff – links	71,5 – 94	17	100kg
147.10	Gehstock ablängbar/Sonderausf.	Fischergriff – links	max. 110	19	100kg
148. ...	Gehstock verstellbar	Fischergriff – rechts	71,5 – 94	17	100kg
149.10	Gehstock ablängbar/Sonderausf.	Fischergriff – rechts	max. 110	19	100kg
Zubehör					
164.10.00	Gehhilfen / Handstockhalter	Flip mit Gummiauflage	D= 22 mm		
164.20.00	Gehhilfen / Handstockhalter	Flip mit Gummiauflage	D= 20 mm		
165.00	Reflektor-Clip 22				
166.00	Eiskralle mit 5 Spitzen				
168.00.16	Big Foot Antirutschpuffer	PU – mit Metalleinlage		16,0-17,5	
168.10.16	Big Foot Antirutschpuffer	PU-- mit Metalleinlage		16,0-18,5	
168.10.17	Big Foot Antirutschpuff. 5	PU – mit Metalleinlage		18,5-20,5	
164.10.20	Gehhilfenhaltercup mit 22 mm	Rohrklammer			
164.10.25	Gehhilfenhaltercup mit 25 mm	Rohrklammer			
164.10.90	Gehhilfenhaltercup mit 30 mm	Rohrklammer			
Ersatzteil					
200.10.00	Saugkapsel 19 mm, schwarz	mit Metalleinlage			
200.10.10	Saugkapsel 17 mm, schwarz	mit Metalleinlage			

Technische Änderungen vorbehalten!



Betriebsanleitung

BA-Nr.: 01.03.006/07-07(KP)



REBOTEC Rehabilitationsmittel GmbH
D-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Telefon: 05431/9416-0
Telefax : 05431/9416-66
<http://www.rebotec.de>
e-mail: info@rebotec.de

Gehstöcke



1. Fischer-Stock
2. Simplex (Fritzgriff)
3. Handy-Stock
4. Anatomischer-Stock
5. Hemi-Stock
6. Para-Soft-Stock
7. Fischer-Stock/ablängbar



(Art. Nr.: siehe Technische Daten / Seite 4)

Verwendungszweck

Die Gehstöcke sind für Personen mit eingeschränkter Gehfähigkeit konzipiert und dienen der Erhöhung der Gangsicherheit. Die Anwendung dieser Gehstöcke kann im Innenraum und außerhalb des Hauses erfolgen. Beachten Sie dazu auch unbedingt die Sicherheitshinweise!

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler oder Pflegepersonal in die Benutzung der Gehhilfe einweisen und deren funktionsgerechte Einstellung vornehmen!

Wiedereinsatz (Verleih)


Die oben genannten Gehstöcke sind nach der Richtlinie 93/42/EWG (Anhang 1) als **Einmalartikel** eingestuft. Hier verweisen wir auf die Bedingungen des Medizinproduktgesetzes (MPG §8) und des Produkthaftungsgesetze (ProdHaftG §4) hin.

Montageanweisung und Inbetriebnahme

Höhenverstellung der Gehstöcke 1. bis 5.

Die Höhenverstellung erfolgt über telekopierbares Alu-Rohr durch Clip- oder Druckknopf.

- Quetschverschraubung (A) durch Linksdrehung lösen
- Verstellclip (C) herausziehen
- Alu-Rohr in die gewünschte Position verschieben
- Verstellclip einschnappen lassen
- Quetschverschraubung (A) durch Rechtsdrehung richtig festdrehen
(Durch das Festdrehen vermindern Sie die Geräuschbildung bei der Benutzung)

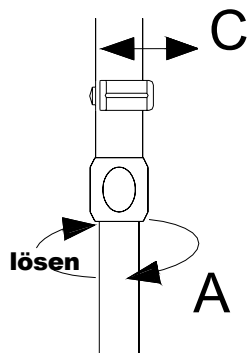


Längenverstellung des Gehstockes 6. und 7.

- Alu-Rohr bzw. Stahl-Rohr leicht einspannen
- (Entsprechende Formbacken beim Einspannen im Schraubstock verwenden!)
- Ablängen des Rohres mit einer Feinsäge, im Winkel von 90 Grad zur Rohrachse
- Ausfransungen an der Schnittkante vermeiden und anschließend entgraten
- Buchse in das Rohr stecken
- Saugkapsel montieren

Austausch der Saugkapsel bei den Gehstöcken 1. bis 7.

Eine abgenutzte oder beschädigte Saugkapsel (E) ist auszutauschen. Ziehen Sie die Saugkapsel von dem Rohrende ab. Eine neue Saugkapsel - auf zugehörige Kapselgröße und Ausführung achten (siehe: Technische Daten) - aufschieben und den festen Sitz überprüfen.

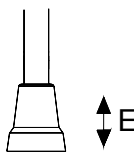

Hinweis! Achten Sie darauf, dass sich in der Saugkapsel ein Metallplättchen befindet. Es schützt davor, dass die Kapsel vom Rohr des Gehstockes durchstoßen werden kann. Die Folge könnte sonst sein, dass es zu einer Beschädigung des Fußbodens kommt.
Risiko einer erhöhten Sturzgefahr durch Wegrutschen.

Instandhaltung

Pflege

Bei den Rohren reicht in den meisten Fällen ein feuchtes Abwischen und anschließendes trockenreiben aus. Alle Kunststoffteile reinigen Sie mit einem handelsüblichen milden Kunststoffreiniger – Produktinformationen beachten.

Hinweis! Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltigen oder öligen Reinigungsmittel.

Wartung

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den Gehstock auf Beschädigungen. Prüfen Sie den festen bzw. richtigen Sitz des Druckknopfes bzw. des Clips, der Saugkapsel und die Rohre. Bei Beschädigung oder Deformierung des Gehstockes umgehend überprüfen lassen. Eine mangelhafte oder vernachlässigte Pflege und Wartung führt zur Einschränkung der Produkthaftung.

Lassen Sie Ihren Gehstock 1x jährlich von einem Fachhändler überprüfen.

Instandsetzung

Zur Durchführung von Instandsetzungsarbeiten wenden Sie sich an einen Fachhändler. Aus Sicherheitsgründen dürfen nur Original-Ersatzteile eingesetzt werden.

Gewährleistung

Auf unsere Gehstöcke geben wir eine Garantie von **24 Monaten**; hiervon sind alle Verschleißteile ausgeschlossen.

Sicherheitshinweise

- Beachten Sie das auf dem Produkt angegebene maximale zulässige Körpergewicht!
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den Gehstock auf Beschädigungen.
- Lassen Sie sich beim Überwinden von Hindernissen zu Ihrer eigenen Sicherheit von einer Begleitperson unterstützen, damit diese Sie bei einem Fallen auffangen kann.
- Führen Sie beim Begehen von Treppen eine Hand am Geländer, die andere Hand stützen Sie auf dem Gehstock ab.
- Sollten Sie doch einmal stürzen: Lassen Sie den Gehstock möglichst seitlich fallen, damit Sie nicht auf den Gehstock fallen!



Achtung! Gefahr möglich: Sturzgefahr durch Wegrutschen

- Überprüfen Sie regelmäßig die Saugkapsel auf Beschädigungen und Abnutzung.
- Der Gehstock muss beim Gehen so senkrecht wie möglich aufgesetzt werden. Setzen Sie daher den Gehstock nie zu weit vom Körper entfernt auf.
- Benutzen Sie den Gehstock nur zur Unterstützung der Gehfähigkeit.
- Der Gehstock darf keinesfalls zweckentfremdet werden.
(z.B.: Aufstehhilfe, zum Hebeln, Versetzen von Möbeln)
- Es dürfen keine mechanischen Veränderungen vorgenommen werden (Haftung!).
- An dem Gehstock keine Gegenstände (Tasche, Beutel, usw.) aufhängen.
- Den Gehstock nicht über längeren Zeitraum der Sonnenstrahlung aussetzen.
(z.B.: am Fenster, an der Heizung, hinter einer PKW-Scheibe)
- Nach längerer Nichtbenutzung: Gehstock durch Fachpersonal überprüfen lassen.
- Gehen Sie niemals mit dem Gehstock ohne Gleitschützer (Eiskralle) auf schnee- oder eisbedeckten Untergrund.
- Vorsicht bei feuchten Fliesen, Böden oder überqueren von losen Teppichböden.