

XXL-TOILETTENROLLSTUHL

GEBRAUCHSANWEISUNG



XXL-TOILETTEROLLSTUHL

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Diese Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produkts. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für eine sichere und gefahrlose Nutzung. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgsam durch und bewahren Sie diese stets griffbereit auf.

INHALT

Das Produkt wird teilmontiert in einem Karton geliefert. Der Karton dient der Aufbewahrung/Wiedereinlagerung und darf nicht entsorgt werden. Prüfen Sie den Inhalt zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Beschädigungen sind umgehend dem Lieferanten zu melden. Spätere Reklamationen können nicht angenommen werden.

Lieferumfang

- Aufbewahrungskarton
- Gestell mit montierter Bereifung
- Fußstütze (hochklappbar)
- Rückenlehne mit Armlehnen
- Sitzbrille und Abdeckpolster
- Eimer mit Deckel
- diese Gebrauchsanweisung

TECHNISCHE DATEN

Das Toilettenstuhlgestell aus Stahl ist durch eine Pulverbeschichtung gegen Korrosion geschützt. Die nach unten abschwenkbaren Armlehnen erleichtern das seitliche Ein- und Aussteigen. Die 5-Zoll-Schwenkräder sind mit wartungsfreien Vollgummireifen versehen. Durch die um 360° drehbaren Räder ist der Toilettenstuhl sehr beweglich und leicht zu lenken. Die leicht zu betätigenden Feststellbremsen der hinteren Schwenkräder sorgen für verlässliche Standfestigkeit.

Maße (B x H x T): 70 x 96 x 89 cm

Sitzmaße (B x H x T): 60 x 53 x 45 cm

Armlehnenhöhe: 22 cm

Öffnung: 25,5 x 30 cm

Gewicht: 20,5 kg

Max. Belastbarkeit: 250 kg

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Gebrauchsanleitung vollständig durch. Wir empfehlen, den Umgang mit dem XXL-Toilettenrollstuhl V-40 vor der ersten Benutzung auf ebenem und bekanntem Gelände zu üben, um riskante Situationen zu vermeiden.

- Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass der Toilettenrollstuhl unversehrt ist, alle verstellbaren Teile ordnungsgemäß befestigt und die Bremsen funktionstüchtig sind.

- Achten Sie darauf, dass der Toilettenrollstuhl V-40 stets vor dem Wegrollen durch Betätigung der Feststellbremse gesichert ist.
- Der XXL-Toilettenrollstuhl ist nur für den Transport einer Person geeignet. Der Transport von Lasten oder mehreren Personen wird als Zweckentfremdung betrachtet.
- Die Benutzung darf ausschließlich im Innenraum und auf festem Untergrund erfolgen.
- Das Kipprisiko kann bei Gleichgewichtsverlagerung durch Körperbewegungen oder Beladung vergrößert werden.
- Zur Überwindung von Hindernissen verwenden Sie bitte unbedingt Auffahrrampen.
- Stellen Sie sich beim Ein- und Aussteigen nie auf die Fußplatten
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien.

INDIKATION

Toilettenrollstühle sind dann erforderlich, wenn das Benutzen oder Erreichen der Toilette aufgrund einer Behinderung nicht mehr möglich ist. Der XXL-Toilettenrollstuhl V-40 kann zusätzlich als Sitzgelegenheit oder Zimmerrollstuhl genutzt werden, wenn er von einer Hilfsperson geschoben wird.

KONTRAINDIKATION

Die Verwendung des XXL-Toilettenrollstuhls V-40 ist nicht zugelassen bei:

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen
- Sitzunfähigkeit

ANWENDUNG

Sitzfläche montieren

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen. Legen Sie die Sitzfläche von oben auf den Rahmen. Die Sitzfläche muss so positioniert werden, dass alle Kontaktflächen auf dem Rahmen liegen. Vergewissern Sie sich, dass die Sitzfläche stabil und sicher auf dem Rahmen liegt.

Schwenkrollen

Der XXL-Toilettenrollstuhl ist mit vier 5-Zoll-Schwenkrollen versehen. Die beiden hinteren Rollen sind mit Totalfeststellern ausgestattet d.h., nach Betätigung sind diese Rollen gebremst und gegen ein Verdrehen gesperrt. Betätigen Sie die Bremse durch einen Tritt auf die Feststellwippe. Zum Lösen der Bremse treten Sie auf den kleinen Wippschalter. Der Toilettenrollstuhl V-40 ist nun wieder bewegbar.

Wegklappen der Armlehnen

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen. Ziehen Sie den Federverschluss/Hebel an den Armlehnen zu sich. Nun können Sie die Armlehne nach unten schwenken. Um diese wieder

XXL-TOILETTE N ROLLSTUHL

in der Ausgangsposition zu fixieren, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. Den Federverschluss/Hebel der Armlehnen einrasten lassen. Vergewissern Sie sich, dass der Federverschluss/Hebel wieder hörbar eingerastet ist.

Hochklappen der Fußstütze

Die Fußstütze kann bei Bedarf hochgeklappt werden.

Ein- und Aussteigen von vorne

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen. Klappen Sie, zum leichteren Ein- und Aussteigen, die Fußstütze hoch. Sobald Sie sicher Platz genommen haben, bringen Sie die Fußstütze wieder in die normale Position.

Ein- und Aussteigen von der Seite

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen. Die Armlehnen können, zum leichteren Ein- und Aussteigen, einfach nach unten geschwenkt werden. Sobald Sie wieder sicher Platz genommen haben, bringen Sie die Armlehnen wieder in die Ausgangsposition.

Benutzung als Toilettenrollstuhl

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen. Zur Benutzung als Toilettenrollstuhl schieben Sie den Eimer ohne Deckel von hinten entlang der Führung unter den Sitz. Entfernen Sie die Hygieneabdeckung. Nach der Benutzung entfernen Sie den Eimer und verschließen ihn mit dem Deckel.

Hinweis: Der XXL-Toilettenrollstuhl-V-40 kann ohne Eimer über ein handelsübliches Toilettenbecken gefahren werden.

Nach der Benutzung

Entfernen Sie den Toiletteneimer erst, nachdem der Benutzer nicht mehr auf dem Toilettenrollstuhl sitzt, sonst besteht eine Klemmgefahr. Legen Sie den Deckel auf. Anschließend reinigen Sie das Produkt wie im nächsten Absatz beschrieben.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Der XXL-Toilettenrollstuhl V-40 sollte nach jeder Benutzung gereinigt und nach jedem Toilettengang desinfiziert werden. Zur Reinigung verwenden Sie ein feuchtes Tuch, bei stärkeren Verschmutzungen setzen Sie ein mildes Reinigungsmittel ein. Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden. Zur Desinfektion ein handelsübliches Flächendesinfektionsmittel verwenden, bitte beachten Sie dabei die Gebrauchsvorschriften des Herstellers.

WIEDEREINSATZ

Der XXL-Toilettenrollstuhl V-40 ist nach einer Überprüfung durch den Fachhändler mit ggf. Austausch defekter Teile und Desinfektion für den Wiedereinsatz vorgesehen. Die Toiletten-einrichtung ist austauschbar.

NUTZUNGSDAUER

Die zu erwartende Nutzungsdauer des XXL-Toilettenrollstuhls V-40 beträgt bis zu vier Jahre, wenn er in Übereinstimmung mit dieser Gebrauchsanweisung verwendet wird und unbeschädigt ist. Er kann über diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, sofern er sich in einem sicheren Zustand befindet und keine Schäden aufweist.

WARTUNG

Der XXL-Toilettenrollstuhl V-40 ist weitestgehend wartungsfrei konzipiert. Falls eine Instandsetzung erforderlich sein sollte, lassen Sie diese nur von einem Fachhändler durchführen. Die Bremsen müssen vor jeder Verwendung auf Funktion überprüft werden. Die Polsterteile und Rahmentteile müssen vor jeder Verwendung einer Sichtkontrolle unterzogen werden. Alle Schraubverbindungen müssen monatlich geprüft und ggf. nachgezogen werden.

GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Sie beinhaltet Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Gewährleistung entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, Schmierölen bzw. Fetten. Bei Nichtbeachtung der Vorgaben dieser Gebrauchsanweisung, bei unsachgemäßer Wartung oder unbefugten Eingriffen in das Produkt, ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers, erlöschen alle Haftungs- und Gewährleistungsansprüche mit sofortiger Wirkung.

ENTSORGUNG

Bitte entsorgen Sie den XXL-Toilettenrollstuhl V-40 auf eine umweltgerechte Art über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die aktuell geltenden Vorschriften.

Das gelieferte Produkt entspricht den aktuellen Richtlinien der MDR 2017/745



Vertrieb durch
aktiv Deutschland
Elektromobile GmbH & Co. KG
Gnutzer Str. 14 | D-24589 Nortorf
www.aktivdeutschland.de



CARELINE GmbH & Co. KG
Ottostraße 11 | 41540 Dormagen
www.careline.de