

## Gebrauchsanweisung


<b>MD</b>	<b>FRELU-Stützklappgriff mit Fallsicherung</b>	
<b>REF</b>	SKG500F	Stützklappgriff 500 mm Ausladung, Fingergriff
	SKG600F	Stützklappgriff 600 mm Ausladung, Fingergriff
	SKG700F	Stützklappgriff 700 mm Ausladung, Fingergriff
	SKG850F	Stützklappgriff 850 mm Ausladung, Fingergriff
	SKG600TPF	Stützklappgriff 600 mm Ausladung, Fingergriff, mit Toilettenpapierhalter
	SKG700TPF	Stützklappgriff 700 mm Ausladung, Fingergriff, mit Toilettenpapierhalter
	SKG850TPF	Stützklappgriff 850 mm Ausladung, Fingergriff, mit Toilettenpapierhalter

<b>Zweckbestimmung</b>	
<p>FRELU-Stützklappgriffe sind ausgelegt für den Einsatz im häuslichen Umfeld, insbesondere Innenräumen, wie zum Beispiel Badezimmern oder Toilettenräumen (Leitungswasser). Sie dienen zur Kompensation von Verletzungen oder Behinderungen, zum Festhalten und Abstützen und unterstützen so körperlich beeinträchtigte Menschen.</p>	
<b>Leistungsmerkmale des Produkts / Technische Daten</b>	
Rohrdurchmesser	32 mm
Wandstärke-Rohr	1,5 mm
Befestigungsplatte	4 x 100 x 275 mm
Max. Belastung	120 kg
Abmessung(en)	von 500 / 600 / 700 / 850 mm
Material / Ausführung	Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Fingergriff, hochglanzpoliert, offene Montage, mit oder ohne Toilettenpapierhalter
<b>Montagehinweise</b>	
<p>Vor Montage ist die Wandbeschaffenheit zu prüfen und sicherzustellen, dass der Aufbau der Last dauerhaft standhält. Aufgrund unterschiedlicher Wand-, Boden- und Deckenverhältnisse sind individuell zugelassene Befestigungsmittel je nach Wandaufbau zu wählen. Beim Anbringen des Produktes ist die Anbauhöhe gemäß DIN 18024/25 zu beachten.</p> <p>Bitte ausschließlich Edelstahlschrauben und für Edelstahl geeignetes Werkzeug verwenden. Die mitgelieferte Standardbefestigung enthält Kunststoffdübel sowie Edelstahlschrauben Ø 6 x 60 nach DIN 7995. Da diese nur zur Befestigung an den Wandtypen Beton B 25, Naturstein (dichtes Gefüge), Vollziegel (M20) und Kalksandstein (Ks 12) geeignet sind, muss die Wandbeschaffenheit von einem Fachmann auf Eignung zum Anbringen des Artikels überprüft werden! Bei anderen Wandtypen muss eine Fachfirma der Befestigungstechnik hinzugezogen werden!</p> <p>Die Montage hat aus Sicherheitsgründen durch eine Fachfirma, zum Beispiel eine:n Installationstechniker:in, zu erfolgen! Für eine ordnungsgemäße Montage wird keine Gewährleistung von uns übernommen.</p>	
<b>Montageanleitung</b>	
<p>Benötigtes Werkzeug :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserwaage</li> <li>• Metermaß</li> <li>• Stift</li> <li>• Bohrmaschine mit Bohrer auf Wandbeschaffenheit und Befestigungsmaterial abgestimmt</li> <li>• Akkuschauber mit passendem Bit</li> <li>• Befestigungsmaterial (wenn mitgelieferte Schrauben/Dübel für Wandtyp ungeeignet)</li> </ul> <p><i>(Empfehlung: bitte nur Werkzeug verwenden, was ausschließlich für Edelstahl benutzt wird)</i></p>	
<p>Markieren Sie zunächst die Bohrlöcher, indem Sie das Hilfsmittel mit Hilfe einer weiteren Person an der Wand mittels Wasserwaage ausrichten. Nun können Sie an den angezeichneten Punkten die Löcher bohren und die Dübel einsetzen, das Hilfsmittel platzieren und festschrauben. Bitte auf festen Sitz prüfen!. Vor Einsatz des mitgelieferten Befestigungsmaterials ist die Wandbeschaffenheit zu prüfen!</p>	
<b>Angaben zu Zubehörteilen</b>	
<p>Es dürfen keine Zubehörteile wie z. B. Duschklapsitze eingehängt werden! Es kann ein Toilettenpapierhalter oder Funkauslöser nachträglich angeklemt werden.</p>	









## Gebrauchsanweisung

<b>Reinigungsanweisung</b>	
<p>Der Edelstahl ist regelmäßig und darüber hinaus bei akuter Verschmutzung zu reinigen, damit die Langlebigkeit erhalten bleibt. Wir empfehlen ein scheuerfreies Mikrofasertuch, mit Wasser angefeuchtet. Falls erforderlich, ist die Desinfektion z. B. mit Sagrotan Wischdesinfektion, möglich. Eventuell eingesetzte Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen für Edelstahl geeignet und ohne scheuernde Wirkung sein und sind immer auf ein Tuch aufzubringen und nicht direkt auf das Produkt. Die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers ist zu beachten.</p> <p>Nicht geeignet sind ausdrücklich: Reinigungsmittel mit Schleifwirkung (wie Stahlwolle, Reinigungsschwämme, Stahlwolle, Bürste etc.), Lösungsmittel, alkalische, säure- und chlorhaltige Reinigungsmittel. Dampfstrahlgeräte und Hochdruckreiniger sollten nicht zum Einsatz kommen und auch keine eisenhaltigen Komponenten!</p>	
<b>Instandhaltungsmaßnahmen / Wartung</b>	
<p>Die Wandbefestigung ist in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz zu überprüfen. Der hochgeklappte Stützklappgriff darf sich beim Herunterklappen nur mit Zug herunterklappen lassen. Bei selbständiger Absenkung müssen die seitlichen Schrauben umgehend nachgezogen werden!</p>	
<b>Vigilanz</b>	
<p>Alle im Zusammenhang mit unseren Produkten aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind uns, der FRELU GmbH, und Ihrer zuständigen Behörde zu melden.</p>	
	<b>Restrisiken / Sicherheitsinformationen / Warnungen / Beschränkungen / Vorsichtshinweise / Maßnahmen bei Fehlfunktion / Leistungsveränderungen des Produktes</b>
<p>Für die Sicherheit des Anwenders darf dieser Artikel nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben (nicht missbräuchlich) und in einwandfreiem Zustand verwendet und die geprüfte max. Belastung nicht überschritten werden, um ein Verletzungsrisiko zu minimieren! Bei langer direkter Sonneneinstrahlung oder Nutzung von heißem Wasser könnte sich die Oberfläche des Griffes erwärmen. Bei loser Verschraubung darf das Produkt nicht verwendet werden! Der Stützklappgriff ist mit einer Fallsicherung ausgestattet, nicht mit einer Arretierung!</p> <p>Die Anleitung richtet sich sowohl an das qualifizierte Fachpersonal als auch an den privaten Anwender des montierten Produktes. Sämtliche Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung sind zu beachten. Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns bitte. Es dürfen nur einwandfreie Produkte – im Originalzustand ohne Modifikation – montiert werden. Sollten Sie Mängel feststellen, sind diese uns umgehend mitzuteilen.</p>	
<b>Entsorgungshinweise</b>	
<p>Die Produktverpackung kann über die Wertstoffsammlung entsorgt werden. Die Metallteile können der Altmetallverwertung zugeführt werden. Die Entsorgung muss den jeweils nationalen Bestimmungen nach erfolgen.</p>	



<b>Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an unser Serviceteam. Sie erreichen uns wie folgt:</b>	
	<b>FRELU GmbH, Wellerscheid 12, DE-53804 Much, +49 22 45 60 00 9 - 0, <a href="mailto:info@frelu.de">info@frelu.de</a></b>

### Symbolerklärung

	Hersteller		Medizinprodukt
	Herstellungsdatum		eindeutige Produktidentifizierung
	Chargenbezeichnung		Warnung vor einer Gefährdung
	Katalognummer		Gebot Anleitung beachten